

## <システム構成機器>



- 本機は Android™ 4.4 以上で Bluetooth® 4.0 以上のスマートフォンあるいはタブレットにて付属インターフェースを介してセンサー記録の開始及びデータダウンロード（本機は同期と称します）設定致します。
- 本機の計測は同期後、通常非利き腕手首に装着し 3 日間～2 週間程度連続記録する方法が一般的です。
- 本機の計測後のデータ記録はタブレットと付属インターフェースと睡眠ウォッチマンを同期後、タブレットに記録した後、睡眠ウォッチマンソフトに搭載されている Mail ボタンを押しタブレットに記録したデータを PDF あるいはプリントスクリーンした後データ画像ファイルをパソコンに記録する仕様となっております。
- 本機の計測後のデータ記録後は必ず ZZZlogger フォルダにあるデータを CD 等記録媒体に記録し、Android™ 端末のキャッシュとデータの消去をした後、ZZZlogger フォルダにあるデータを全部削除して使用して下さい。

### <システム構成機器内訳>


- 睡眠ウォッチマン
- 同上用付属インターフェース
- Android 端末

※オプション（データ記録を Android 端末以外で行う場合）

1. MicroUSB ケーブル（Android 端末とパソコン間データ接続ケーブル）
2. WindowsPC（Android 端末と接続可能な OS）

# アクチグラフ記録解析データ出力例

## タイプ A (PDF 出力の場合) 【1,7,14,30 日分レポート】

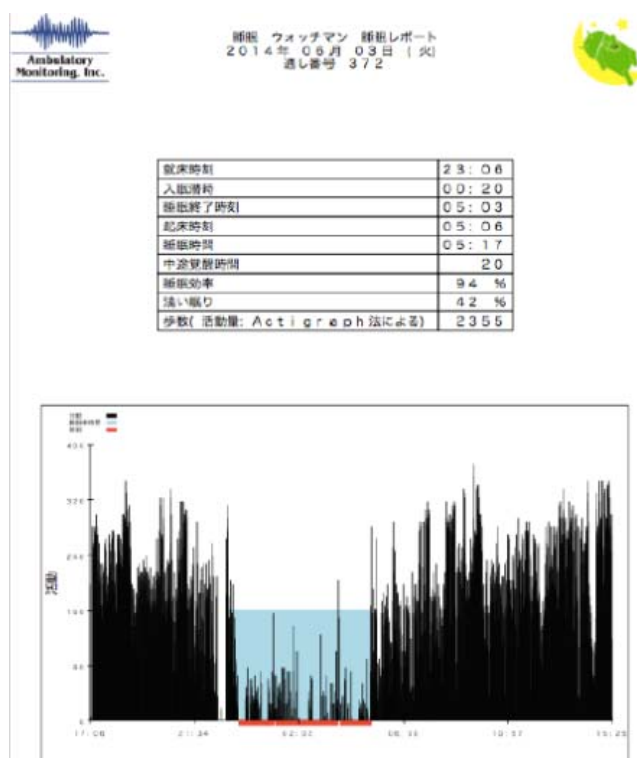

## タイプ B]

(Android 端末で画面キャプチャーして出力の場合)

